

INCLUS DANS LE KIT INTERNATIONAL



3 tubes SST



3 tubes LAV



2 tubes à bouchon blanc



1 gobelet à urine



1 pipette Aptima Urine 2

LISTE DE CONTRÔLE DU PATIENT


- Réfrigérer les packs de gel avant la prise de sang. (DOIT être posé à plat lors de la congélation pour l'expédition.)
- Vérifiez les dates d'expiration sur tous les flacons et contenants. (NE PAS utiliser si la date est expirée)
- Vérifiez la commande de laboratoire à l'intérieur de la boîte du kit pour confirmer que le nom complet, la date de naissance et les données démographiques sont corrects.
- Assurez-vous d'apporter l'ensemble du kit, y compris les documents et les packs de gel, à votre rendez-vous.
- Ne pas uriner 1 heure avant le prélèvement.

DOCUMENTS

Instructions pour le kit international
Facture pro forma et lettres de dédouanement
Sac d'expédition FedEx UN3373 et pochette violette FedEx
Étiquette de retour FedEx

INSTRUCTIONS DE COLLECTE

1. Vérifiez l'ordonnance de laboratoire à l'intérieur du kit et confirmez que toutes les informations sur le patient sont renseignées et correctes.
2. Étiquetez tous les tubes et conteneurs avec le prénom et le nom du patient, sa date de naissance et la date de prélèvement.
3. Commencez la collecte des échantillons de sang en utilisant tous les tubes fournis dans le kit.
4. Après la collecte, prenez 3 tubes SST et 3 tubes LAV et mélangez-les en les retournant 8 à 10 fois.
5. Laissez tous les tubes coaguler pendant au moins 30 minutes mais pas plus d'une heure avant la centrifugation.
6. Centrifuger à 1 000-1 300 G ou 2 200-2 500 tr/min pendant 15 minutes et dans l'heure suivant le prélèvement.
7. Prenez (1) tube SST et extrayez un maximum de 3 ml de sérum et transférez-le dans le tube à bouchon blanc étiqueté « SÉRUM ».
8. Prenez (1) tube LAV et extrayez un maximum de 3 ml de plasma et transférez-le dans le tube à bouchon blanc étiqueté « PLASMA ».
9. Pour la collecte d'urine, demandez aux patients un minimum de 20 à 30 ml d'urine dans un gobelet à urine stérile.
10. **Si un test CT/NG est nécessaire, transférez 2 ml d'urine du gobelet dans le tube jaune Aptima. (Veuillez jeter le gobelet à urine après le transfert)**

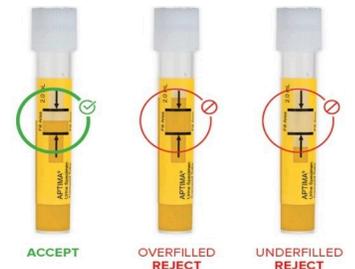

Tube Aptima : Remplissez uniquement entre les lignes noires. Tout remplissage excessif ou insuffisant sera rejeté.

INSTRUCTIONS D'EXPÉDITION

1. Assurez-vous que tous les conteneurs sont étiquetés avec le nom complet du patient, la date de naissance et la date de collecte.
2. Une fois que vous avez vérifié tous les tubes et échantillons d'urine, placez-les dans le sac pour échantillons de matières biologiques dangereuses.
3. Ajoutez des packs de gel dans l'enveloppe à bulles argentée contenant les échantillons des patients et fermez-la.
4. Assurez-vous que l'ordonnance de laboratoire est correctement remplie et que tous les tests sont clairement indiqués.
5. Ajoutez l'ordonnance de laboratoire du patient, l'enveloppe à bulles argentée avec les échantillons des patients dans la boîte du kit et fermez-la.
6. La facture pro forma DOIT être entièrement remplie et signée par le patient ou la clinique.
7. Ajoutez l'étiquette de retour et la facture pro forma dans la pochette violette FedEx et fixez-la à l'extérieur du pack FedEx.
8. Organiser un enlèvement ou un dépôt FedEx. Remarque : pour l'enlèvement, appelez le 1 800 463-3339 (1 800 GO-FEDEX)